


## Scheda tecnica e di sicurezza

	<b>Mascherina protettiva Serie Oxylab 95</b>
Codice	FFP295
Destinazione d'uso	Uso sanitario non chirurgico, uso industriale, uso civile
Famiglia	Dispositivo di protezione individuale
Tipologia	Mascherina di protezione oro-nasale riutilizzabile
Modello	6601-A
Numero strati	5
Materiale	1° strato – cotone 50g 2° strato – PP termosaldato 3° strato – tessuto melt-blown 50g 4° strato – PP termosaldato 5° strato – cotone 30g
Caratteristiche	Resistenza a trazione longitudinale e trasversale; permeabile ad acqua, vapore e aria; resistente ad acidi, solventi organici e alcalini; anallergico e non irritante; adattabile ai diversi settori di applicazione.
BFE	> 95% - Efficacia di filtrazione batterica (Standard minimo AORN 95%)
Resistenza al flusso espiratorio	mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> < 3,5
Comfort	Aerazione minima garantita
Peso	9,6 gr
Dimensioni	15,5 cm x 10,5 cm
Marcatura	CE in corso di validazione
Classe di appartenenza	I
Standard UNI	EN 149:2001+A1:2009
Provenienza	China
Azienda produttrice	Anhui Jian Yuan Medical Equipment Co. Ltd/ Taizhou Guotai Safety Equipment Manufacturing Co. Ltd

## **Avvertenze e limiti d'uso**

1. Questo respiratore non fornisce ossigeno. Non usare in ambienti con livello di ossigeno inferiore al 19,5%.
2. Non utilizzare quando i contaminanti sono in concentrazioni immediatamente pericolose per la salute e la vita, sconosciute, o hanno scarse proprietà di avvertimento (come odore o sapore).
3. Non utilizzare per la protezione da vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C.
4. Non alterare o modificare il respiratore.
5. Non utilizzare il respiratore in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto tra il volto ed il bordo di tenuta.
6. Non utilizzare per la protezione da contaminanti in concentrazioni che generano calore.
7. Non utilizzare i respiratori come dispositivi di emergenza.
8. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se: a) il respiratore risulta danneggiato b) la respirazione diventa difficoltosa c) si avvertono vertigini o senso d'angoscia d) si avverte l'odore o il sapore del contaminante o senso di irritazione

## **Istruzioni di indossamento**

Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. Le mascherine protettive non devono essere indossate in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso. Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta della mascherina

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.
2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.
3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.
4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.
5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta

